

CZ



- A. FERTI·LILY GEL NA PODPORU POČETÍ
- B. JAK POUŽÍVAT FERTI·LILY GEL PRO PODPORU POČETÍ
- C. UPOZORNĚNÍ
- D. SLOŽENÍ

A. FERTI·LILY GEL NA PODPORU POČETÍ

FERTI·LILY Gel na podporu početí je lubrikant, který můžete používat, když se snažíte otěhotnět. Je klinicky prokázáno, že FERTI·LILY Gel je šetrný ke spermiám. FERTI·LILY Gel na podporu početí je izotonický, jeho pH je příznivé pro přežití spermií a napodobuje prostředí v těle umožňující početí. FERTI·LILY Gel na podporu početí můžete používat v kombinaci s FERTI·LILY Kalíškem na podporu početí, abyste zvýšila svoji šanci otěhotnět. FERTI·LILY Gel na podporu početí je určen k dočasnému použití během plodného období menstruačního cyklu, aby pomohl zmírnit sucho poševní sliznice a/nebo zvýšit prožitek z pohlavního styku.

B. JAK POUŽÍVAT FERTI·LILY GEL PRO PODPORU POČETÍ

KROK 1:
Před prvním použitím odstraňte těsnící zátku z tubičky.

KROK 2:
Aplikujte lubrikant vně vagíny nebo na tělo penisu před pohlavním stykem.

Vytlačte malé množství produktu na prsty nebo na dlaň vaší ruky a aplikujte na oblast genitálií. Obměňujte množství k dosažení požadované lubrikace.

KROK 3:
Po každém použití důkladně tubičku zavřete. Nenechte tubičku otevřenou mezi používáním.

C. UPOZORNĚNÍ

Pokud jste citlivá, nejdříve zkuste aplikovat malé množství gelu do jamky mezi paží a předloktím, abyste vyzkoušela, zda jste citlivá na složení gelu. FERTI·LILY Gel na podporu početí se může používat po 3 měsíce od otevření. Nepoužívejte FERTI·LILY Gel na podporu početí, pokud procházíte kvasinkovou nebo bakteriální infekcí, nebo jste v nedávné době utrpěla zranění či podráždění v oblasti vagíny. Znovu používejte až po úplném vyléčení infekce. Jestliže zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, přerušete užívání a konzultujte s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

D. SLOŽENÍ (DLE NORMY INCI)

Voda, fenethylalkohol, hyaluronát sodný, xanthanová guma, fruktóza, bikarbonát sodný, chlorid sodný, chlorid draselný, fosforečnan disodný, fosforečnan draselný, kyselina citrónová.

Výrobce:
Rosesta Medical BV
Mr Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
Holandsko

Distributor:
INDIÁNKY distribuce s.r.o.
Višňová 1303/11
Praha 4 14000
Česká republika



FERTI·LILY Gel pro podporu početí je **zdravotnický prostředek** Třída I

Datum poslední revize: Srpen 2022

www.fertilily.com

SK



- A. FERTI·LILY GÉL NA PODPORU POČATIA
- B. AKO POUŽÍVAŤ FERTI·LILY GÉL NA PODPORU POČATIA
- C. UPOZORNENIE
- D. ZLOŽENIE

A. FERTI·LILY GÉL NA PODPORU POČATIA

FERTI·LILY Gél na podporu počatia je lubrikant, ktorý môžete použiť, keď sa snažíte otehotnieť. Gél na podporu počatia je klinicky preukázaný ako šetrný k spermiiám. FERTI·LILY Gél na podporu počatia je izotonický, má jemné pH na prežitie spermií a napodobňuje vlastnosti fluida na podporu počatia. FERTI·LILY Gél na podporu počatia je možné použiť v kombinácii s FERTI·LILY Kalíškom na podporu počatia, aby ste zvýšili svoje šance na otehotnenie. FERTI·LILY Gél na podporu počatia je určený na dočasné použitie počas plodného obdobia menštruačného cyklu, aby pomohol zmierniť suchosť vaginálnej sliznice a/alebo zvýšiť potešenie.

B. AKO POUŽÍVAŤ FERTI·LILY GÉL NA PODPORU POČATIA

KROK 1:
Pred prvým použitím odstráňte tesnenie z tuby.

KROK 2:
Aplikujte lubrikant vonku pošvy alebo na penis pred pohlavným stykom.

Vytlačte malé množstvo produktu na prsty a/alebo na dlaň ruky a aplikujte na oblasť genitálií. Upravte množstvo aby ste dosiahli požadovanú lubrikáciu.

KROK 3:
Po každom použití tubu dôkladne uzavrite. Nenechávajte tubu otvorenú medzi použitím.

C. UPOZORNENIE

V prípade podozrenia na precitlivosť na zloženie gélu skúste aplikovať malé množstvo gélu do jamky medzi pažou a predlaktím, aby ste zistili, či ste citliví na zloženie gélu. FERTI·LILY Gél na podporu počatia sa môže používať 3 mesiace od jeho otvorenia. Nepoužívajte FERTI·LILY Gél na podporu počatia, ak máte kvasinkovú alebo bakteriálnu infekciu alebo ste nedávno utrpeli zranenie alebo podráždenie v oblasti pošvy. Opätovné použitie je možné až po úplnom vyliečení infekcie. Ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, prestaňte gél používať a poraďte sa s lekárom. Uchovávejte mimo dosahu detí.

D. ZLOŽENIE (PODĽA NORMY INCI)

Voda, fenethylalkohol, hyaluronát sodný, xantánová guma, fruktóza, bikarbonát sodný, chlorid sodný, chlorid draselný, fosforečnan disodný, fosforečnan draselný, kyselina citrónová.

Výrobca:
Rosesta Medical BV
Mr Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
Holandsko

Distribútor:
INDIÁNKY distribuce s.r.o.
Višňová 1303/11
Praha 4 14000
Česká republika



FERTI·LILY Gél na podporu počatia je **zdravotnícka pomôcka** Triedy I

Datum poslednej revízie: August 2022

www.fertilily.com

LF77241941
22H1

